

# Blephasteam

## MEDISCH HULPMIDDEL

Verwarmende bril voor de oogleden, vochtige warmte-technologie.

### Beschrijving:

Medisch hulpmiddel dat latente warmte verspreidt, om de Meibomklieren vrij te maken en zo het welzijn van de ogen en oogleden te verbeteren.

### Indicaties:

Blephasteam is ontworpen om de symptomen die met Meibomklierdysfunctie geassocieerd zijn, te verlichten. Deze dysfunctie veroorzaakt een aantal oogirritaties, zoals het syndroom van droge ogen.

De warmte en het vocht dat ontstaat binnenin de bril, doet de secreties in de verstopte klieren smelten, zodat het gemakkelijker wordt om deze secreties door druk en massage te doen vrijkomen.

### Hoe gebruikt u dit product:

Het is aangeraden om Blephasteam 2 keer per dag te gebruiken, tenzij uw oogarts het anders aangeraden heeft. Laat minstens 4 uren tussen elke behandeling.

De bril mag enkel gebruikt worden met vochtige Blephasteam ringen. Voor elke behandeling moeten nieuwe ringen gebruikt worden, om optimale doeltreffendheid van de behandeling te verzekeren.

Oogdruppels moeten minstens 15 minuten vóór het gebruik van Blephasteam worden toegediend.

[Voor meer informatie, raadpleeg de bijsluiter ingesloten in de verpakking.](#)

