

Hyabak

MEDISCH HULPMIDDEL

Oogdruppels (hyaluronzuur) voor het bevochtigen en smeren van ogen en contactlenzen.

Samenstelling:

Natrium hyaluronaat, natriumchloride, actinoquinol, trometamol, hydrochloridezuur, water voor injecties. Zonder bewaarmiddel.

Indicaties:

- bevochtigen en smeren van ogen in geval van een gevoel van droge ogen, of oculaire vermoeidheid veroorzaakt door externe factoren zoals wind, rook, vervuiling, stof, droge warmte, airco, vliegtuigreizen, langdurig beeldschermgebruik
- bij contactlenzdragers: voor het smeren en bevochtigen van de lens, om het in en uitzetten te vergemakkelijken.

Posologie:

- 1 druppel in elk oog gedurende de dag, zo vaak als nodig is
- voor contactlenzdragers: een druppel op elke lens bij het in- en uitzetten van de lens

Hoe gebruikt u dit product:

Lokale toediening: in de ogen druppelen.

Presentatie:

- 10 ml flacon, zonder bewaarmiddel
- 12 weken houdbaar na opening
- ook beschikbaar in Duopak, 2 x 10 ml

[Voor meer informatie, raadpleeg de bijsluiter ingesloten in de verpakking.](#)

