

Hydrabak

MEDISCH HULPMIDDEL

Bevochtigingsvloeistof (natriumchloride) voor oogoppervlak en contactlenzen.

Samenstelling:

Natriumchloride 0,9 %, natriumdi-waterstoffsfaat dihydraat, natriumwaterstoffsfaat dodecahydraat, water voor injecties. Zonder bewaarmiddel.

Indicaties:

- dragers van contactlenzen: bevochtiging van het oogoppervlak en de contactlenzen teneinde het draagcomfort te verbeteren
- voor personen die last hebben van brandende, prikkerige en vermoeide ogen ten gevolge van externe oorzaken zoals: werken met beeldschermen, droge atmosfeer, rook, stof

Posologie:

1 druppel, 3 à 4 keer per dag tot maximaal 8 keer per dag.

Hoe gebruikt u dit product:

Lokale toediening: in de ogen druppelen.

Presentatie:

- 10 ml flacon, zonder bewaarmiddel
- 8 weken houdbaar na opening

Voor meer informatie, raadpleeg de bijsluiter ingesloten in de verpakking.

